



DMV Ultra™ / DMV 45™

Pour insérer et retirer les lentilles rigides perméables aux gaz

But de l'utilisation

Le DMV Ultra et le DMV 45 conviennent pour mettre et retirer des lentilles de contact dures (stables dimensionnellement) et perméables aux gaz. Tenez le DMV Ultra debout et le DMV 45 à un angle d'environ 45°.

Mode d'emploi

 Avant d'utiliser le DMV Ultra /DMV 45 s pour la première fois, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique à 70% et laissez-le sécher à l'air.

RETIRER – Humidifiez la ventouse du DMV Ultra/DMV 45 avec saline et guidez-la vers l'œil. Assurez-vous que la lentille de contact est centrée sur l'œil. Alignez la ventouse devant la lentille et touchez le centre de la lentille à l'aide d'un miroir. Retirez la lentille de contact directement de l'œil. Après l'avoir retirée, faites glisser la lentille de contact avec précaution sur le côté de la ventouse.

INSERTION – Placez la lentille de contact humide sur la petite coupelle à l'extrémité étroite de la poignée. La lentille humide adhèrera dans cette position. Mettez la lentille en contact avec l'œil.

Suivez les instructions de votre spécialiste des lentilles de contact / professionnel de la vue.

Nettoyage

Après chaque utilisation du DMV Ultra/DMV 45, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique à 70% et laissez-le sécher à l'air libre. Rangez l'appareil dans son étui après l'avoir séché. Prévoyez de le remplacer tous les six mois.

 **Précaution:** Si le dispositif devait accidentellement se fixer à l'œil, faites-le glisser jusqu'au coin de l'œil et retirez-le en le tournant.

 **Considération:** Tenir le DMV Ultra /DMV 45 éloigné de la crème pour les mains, du gel capillaire, du dissolvant pour vernis à ongles et des agents oxydants puissants.

 **Considération: Risque d'étouffement pour les jeunes enfants.** Garder ce produit et tous les autres instruments médicaux hors de portée des jeunes enfants. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour les yeux malades ou blessés. Si vous avez un œil rougi, si vous avez le mauvais œil ou si vous ressentez une douleur, consultez votre spécialiste en lentilles de contact ou un ophtalmologiste.

 **Considération:** Bien qu'il n'y ait aucune indication d'allergie, DMV Corporation vous rend attentif au fait que ce **produit est fait de caoutchouc naturel sec**. Cependant, **le matériau ne contient pas de latex liquide** connu sous le nom d'allergène.

 **N'utilisez pas DMV Ultra /DMV 45 pour les lentilles de contact souples ou hybrides.**

Si un incident grave vous concernant est survenu avec cet appareil, signalez-le au fabricant. Si vous résidez dans l'UE, signalez l'incident à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous êtes établi.

Ce produit permet aux porteurs de lentilles de contact d'insérer et / ou de retirer leurs lentilles de contact afin de les utiliser conformément à leur destination. Par conséquent, il est considéré comme un dispositif médical.

 Dispositif médical

 Ne pas conserver plus chaud que 105° C / 220° F

 Suivez les instructions d'utilisation dmvcorp.com

 EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

 Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

 UK
IGO Optical Ltd,
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

 Protéger du soleil direct

 Un seul patient – à usage multiple

 Date de fabrication

 EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague;
The Netherlands

 MEDENVOY SWITZERLAND
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

 EMERGO CONSULTING (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



 DMV CORPORATION
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA