



SWE



DMV Magic Touch™

För hårda och syregenomträngliga kontaktlinser

Avsedd användning

Produkten är utformad för att sätta in/ta ut hårda och syregenomträngliga kontaktlinser.

Bruksanvisning



Rengör produkten med 70 % isopropylalkohol och låt lufttorka innan du använder den första gången.

UTTAGNING – Fukta sugproppen. Tryck ihop ordentligt mitt på handtaget. Kontrollera att kontaktlinsen sitter mitt på ögat. Placera sugproppen framför linsen och låt den komma i kontakt med linsens mitt med hjälp av en spegel. Håll handtaget i ett fast grepp för att skapa sug. Ta ut kontaktlinsen ur ögat. När du har tagit ut kontaktlinsen, släpp handtaget och låt linsen glida av sugproppen.

INSÄTTNING – Placera den fuktiga kontaktlinsen på sugproppen. Den fuktade linsen fastnar i detta läge. Tryck **INTE** ihop handtaget. Placera kontaktlinsen på ögat.

Följ anvisningarna från din optiker.

Rengöring

Rengör DMV Magic Touch med 70 % isopropylalkohol efter varje användning och låt lufttorka. Förvara produkten i fodralet efter torkning. Håll luftkanalen fri från föroreningar. Byt ut den var sjätte månad.



Försiktighetsåtgärd: Försiktighetsåtgärd: Om DMV Magic Touch av misstag fastnar på ögat, släpp handtaget och den faller från ögat. Produkten fastnar inte på ögat.



Warning: Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor som handkräm, härgel, nagellackborttagningsmedel och kraftigt oxiderande ämnen.



Warning: Kvävningsrisk. Förvara denna och andra medicintekniska produkter utom synhåll för barn. Denna produkt rekommenderas inte vid ögonsjukdom eller skadade ögon. Om du får ögonirritation, ovanlig synnedbättring eller smärta, kontakta optiker.



Warning: Det finns inga bevis för allergiska problem med produkten. **Den innehåller torr naturgummi. Den innehåller inte flytande latex, en känd allergen.**



Använd INTE DMV Magic Touch för MJUKA kontaktlinser eller hybridkontaktlinser.

Om en allvarlig incident har uppkommit i samband med produkten, rapportera det till tillverkaren. Om du bor i ett EU-land, rapportera händelsen till behörig myndighet i det medlemsland där du bor.

Denna produkt gör det möjligt för kontaktlinsebärare att sätta in och/eller ta ut kontaktlinser för att använda dem enligt avsedd användning. Således anses denna produkt vara en medicinteknisk produkt.

Avfallshantering

DMV Corporation rekommenderar att använda DMV-produkter kasseras i enlighet med lokala anvisningar vid tidpunkten för kassering.



Denna produkt en medicinteknisk produkt



Skyddas mot direkt solljus



Importör



Förvaras vid högst 105°C



En patient – flera användningar



Tillverkare



Läs bruksanvisningen
dmvcorp.com



Tillverkningsdatum



Tillverkningsland



Auktoriserad representant



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsewijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

