




SWE

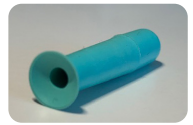

## DMV CLASSIC™

### För hårda och syregenomträngliga kontaktlinser

#### Avsedd användning

Produkten är utformad för att sätta in/ta ut hårda och syregenomträngliga kontaktlinser.

#### Bruksanvisning

Rengör produkten med 70 % isopropylalkohol och låt lufttorka innan du använder den första gången.

**UTTAGNING** – Fukta sugproppen. Kontrollera att kontaktlinsen sitter mitt på ögat. Tryck ihop handtaget på DMV Classic och för det till mitten av kontaktlinsen. Peka på kontaktlinsens framsida medan du tittar i en spegel. När DMV Classic vidrör linsen, släppa handtaget något så att DMV Classic fastnar på linsen. Ta ut kontaktlinsen ur ögat. När du har tagit ut linsen, tryck på handtaget igen så att suget upphör och ta bort linsen från sugproppen.

**INSÄTTNING** – Placera den fuktiga kontaktlinsen på proppen utan att trycka ihop handtaget. Den fuktade linsen fastnar på proppen. Tryck INTE ihop handtaget när du sätter in linsen. Placera försiktigt den sklerala linsen på det öppna ögat. Följ anvisningarna från din optiker.

Följ anvisningarna från din optiker.

#### Rengöring

Rengör DMV Classic med 70 % isopropylalkohol efter varje användning och låt lufttorka. Förvara produkten i fodralet efter torkning. **Håll luftkanalen fri från föroreningar.** Byt ut den var sjätte månad.

**Försiktighetsåtgärd:** Försiktighetsåtgärd: Om DMV Classic av misstag fastnar på ögat, tryck ihop handtaget så att suget upphör och ta bort den från ögat.

**Varning:** Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor som handkräm, hårgel, nagellackborttagningsmedel och kraftigt oxiderande ämnen.

**Varning: Kvävningsrisk.** Förvara denna och andra medicintekniska produkter utom synhåll för barn. Denna produkt rekommenderas inte vid ögonsjukdom eller skadade ögon. Om du får ögonirritation, ovanlig synnedläggelse eller smärta, kontakta optiker.

**Varning:** Det finns inga bevis för allergiska problem med produkten. **Den innehåller torr naturgummi. Den innehåller inte flytande latex, en känd allergen.**

**Använd INTE DMV Classic för MJUKA kontaktlinser eller hybridkontaktlinser.**

Om en allvarlig incident har uppkommit i samband med produkten, rapportera det till tillverkaren. Om du bor i ett EU-land, rapportera händelsen till behörig myndighet i det medlemsland där du bor.

Denna produkt gör det möjligt för kontaktlinsebärare att sätta in och/eller ta ut kontaktlinser för att använda dem enligt avsedd användning. Således anses denna produkt vara en medicinteknisk produkt.

#### Avfallshantering

DMV Corporation rekommenderar att använda DMV-produkter kasseras i enlighet med lokala anvisningar vid tidpunkten för kassering.

Denna produkt en medicinteknisk produkt

Förvaras vid högst 105°C

Läs bruksanvisningen  
dmvcorp.com

Skyddas mot direkt solljus

En patient – flera användningar

Tillverkningsdatum

Importör

Tillverkare

Tillverkningsland

Auktoriserad representant

EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland

UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA