




hrv

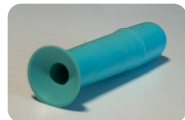

DMV CLASSIC™

Za tvrde i plinopropusne kontaktne leće

Namjena

Ovo pomagalo namijenjeno je za umetanje i uklanjanje tvrdih i plinopropusnih kontaktnih leća.

Upute za uporabu

Prije prvog korištenja očistite pomagalo 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite da se osuši.

Uklanjanje – Navlažite sukcijisku čašicu. Provjerite da je kontaktna leća u oku smještena centralno. Stisnite ručku pomagala DMV Classic i prinesite ga do sredine kontaktne leće. Dodirnite prednju stranu kontaktnih leće dok se gledate u ogledalo. Dok pomagalo DMV Classic dodiruje leću, otpustite pritisak na dršku kako biste omogućili da se pomagalo DMV Classic priljubi za leću. Uklonite leću izravno iz oka. Nakon uklanjanja leće stisnite ponovno dršku kako bi se otpustio negativan tlak (sukcija) i leća odvojila od sukcijiske čašice.

Umetanje – Postavite navlaženu kontaktnu leću na čašicu bez stiskanja ručke. Vlažna leća će se priljubiti za čašicu. NEMOJTE stiskati ručku dok umećete leću. Umetnite kontaktnu leću izravno u oko.

Slijedite upute svoga optičara/oftalmologa.

Čišćenje

Svakiput nakon uporabe pomagalo DMV Maxi Cup očistite 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite ga da se osuši. Nakon sušenja pomagalo spremite u njegovu kutiju. **Pazite da u zračnom kanalu ne bude ostataka nečistoća.** Planirajte ga zamijeniti svakih šest mjeseci.

Mjere opreza: Ako se pomagalo DMV Classic slučajno zaljepi za oko, stisnite dršku i odvojite je od oka.

Oprez: Ovaj proizvod nemojte držati u blizini tekućina kao što su krema za ruke, gel za kosu, sredstvo za uklanjanje laka za nokte i jako oksidirajućih sredstava.

Oprez: Opasnost od gušenja. Držite ovo pomagalo i sve druge medicinske naprave izvan dosega male djece. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu kod bolesnih ili ozlijeđenih očiju. Ako iskusite nadražaj oka, neobičajeno oslabljen vid ili bol, obratite se oftalmologu.

Oprez: Premda s primjenom ovog proizvoda nisu zabilježene alergije, **proizvod sadrži suhu prirodnu gumu. Ne sadrži poznati alergen tekući lateks.**

DMV Classic NEMOJTE upotrebljavati za MEKE ili hibridne kontaktne leće.

Ako Vam se svezi primjene ovog proizvoda dogodi ikakav ozbiljni događaj, prijavite to proizvođaču. Ako živite u EU događaj prijavite kompetentnim tijelima u zemlji članici u kojoj ste nastanjeni.

Ovaj proizvod omogućuje nosiocima kontaktnih leća umetanje i uklanjanje kontaktnih leća tako da se upotrebljava u skladu s namjenom. Stoga se ovaj proizvod smatra medicinskim proizvodom.

Zbrinjavanje otpada

Korporacija DMV preporučuje zbrinjavanje iskorištenih DMV proizvoda u skladu s lokalnim propisima važećima u trenutku zbrinjavanja.

Ovo je medicinski proizvod.

Ne čuvati na temperaturi iznad 105 °C/220°F

Pročitajte upute za uporabu dmvcorp.com

Zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla

Za jednog pacijenta - višekratna uporaba

Datum proizvodnje

Uvoznik

Proizvajalec

Država proizvajalca

Ovlašteni predstavnik

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA