



por



DMV Soft Lens Handler™

Removedor/Introdutor para lentes de contacto hidrófilas

Utilização prevista

O DMV Soft Lens Handler foi concebido para introduzir e remover lentes de contacto hidrófilas.

Instruções de utilização

Antes de utilizar pela primeira vez, limpe o dispositivo com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar.

Remoção – Pressione as zonas de prensão firmemente contra a frente da lente de contacto hidrófila. Utilizando um espelho, assegure-se de que a lente está na córnea. Aperte as zonas de prensão suave e conjuntamente para extrair a lente de contacto.

Introdução – Coloque uma lente de contacto humedecida na extremidade pequena do dispositivo, onde é indicado pela seta. Deixe que a lente se sobreponha à extremidade do dispositivo, para que possa ver o seu progresso através da lente.

Siga as instruções do seu especialista em lentes de contacto/ocular.

Limpeza

De cada vez que utiliza o dispositivo, limpe-o com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar. Depois de estar seco, armazene o dispositivo na respetiva caixa. Planeie a respetiva substituição a cada seis meses.

Precaução: Se aplicar o dispositivo acidentalmente na superfície do olho, basta retirá-lo do olho, porque não há sucção. Evite fazer deslizar o dispositivo sobre a superfície do olho.

Cuidado: Mantenha este produto afastado de líquidos como creme para as mãos, gel para o cabelo, removedor de verniz de unhas e agentes oxidantes fortes..

Cuidado: Perigo de asfixia. Mantenha este e todos os outros dispositivos médicos fora do alcance das crianças pequenas. Não se recomenda a utilização deste produto em caso de doença ou lesão ocular. Em caso de irritação ocular, perturbação involgar **da vista ou dor, consulte o seu especialista ocular.**

Cuidado: Embora não haja evidências de alergias com este produto, o produto contém borracha natural seca. Não contém látex líquido, que é um alérgico conhecido.

Cuidado: **NÃO UTILIZE este dispositivo com lentes de contacto rígidas, permeáveis aos gases, esclerais ou híbridas.**

Se lhe tiver ocorrido qualquer incidente grave em relação a este dispositivo, notifique o fabricante. Caso resida na UE, notifique a autoridade competente do Estado-Membro onde vive sobre o incidente.

Este produto permite que as pessoas que usam lentes de contacto as introduzam e/ou removam para as utilizarem de acordo com a finalidade prevista. Portanto, considera-se que este produto é um dispositivo médico.

Eliminação de resíduos

A DMV Corporation recomenda que os produtos DMV utilizados sejam eliminados em conformidade com os regulamentos locais em vigor no momento da eliminação.

Este produto é um dispositivo médico.

Não armazenar a uma temperatura superior a 105 °C / 220 °F

Ler as instruções de utilização. dmvcorp.com

Representante autorizado

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Proteger da luz solar direta.

Doente único — utilização múltipla

Data de fabrico

Importador

Fabricante

País de fabricação

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

