



dan



# DMV Scleral Cup™

## Til sklerale kontaktlinser og øjenproteser

### Påtænkt anvendelse

DMV Scleral Cup er beregnet til isætning/udtagning af sklerale kontaktlinser og udtagning af øjenproteser.

### Brugsanvisning

Før enheden anvendes første gang, renses den med 70 % isopropylalkohol med efterfølgende lufttørring.

Udtagning – Fugt sugekoppen, og klem på håndtaget. Anbring sugekoppen mod den sklerale kontaktlinse ved brug af et spejl. Frigør trykket på håndtaget, hvorved kontaktlinsen fastholdes ved sugning. Kontaktlinsen kan herefter håndteres på en måde, der muliggør udtagning af kontaktlinsen fra øjet. Følg anvisningen fra din kontaktlinsetilpasser for den bedste teknik. Efter udtagning klemmes igen på håndtaget til standsning af sugning og fjernelse af linsen fra sugekoppen.

Isætning – Anbring den våde kontaktlinse på koppen uden af presse håndtaget sammen. Den våde linse vil klæbe til koppen. UNDLAD at klemme på håndtaget under isætning af linsen. Anbring forsigtigt den sklerale linse i det åbne øje.

Følg anvisningen fra din kontaktlinsetilpasser/øjneplejerson.

### Rensning

DMV Scleral Cup skal hver gang efter brug renses med 70 % isopropylalkohol og efterfølgende lufttørres. Enheden opbevares i dens pakning efter tørring.

**Hold luftkanalen fri for materiale.** Planlæg at udskifte den hver 6. måned.

**Forsigtighedsforanstaltning:** Hvis DMV Scleral Cup utilsigtet sætter sig fast på øjet, klemmes der let på håndtaget til standsning af sugning, og enheden fjernes fra øjet.

**Forsigtig:** Produktet må ikke opbevares sammen med væsker, såsom håndcreme, hængeler, neglelakfjerner og kraftige oxidreringsmidler.

**Forsigtig: Kvælningsfare.** Denne og alle andre medicinske enheder skal opbevares utilgængeligt for små børn. Dette produkt bør ikke anvendes ved sygdom eller skade i øjet. Hvis du får et irriteret øje, en usædvanlig synsforringelse eller smerter, skal du konsultere din øjenplejerson.

**Forsigtig:** Der er ingen evidens for allergiproblemer med dette produkt, omend det indeholder tørt naturgummi. Det indeholder ikke flydende latex, som er et kendt allergen.

**Brug IKKE DMV Scleral Cup til bløde kontaktlinser eller hybridlinser.**

Hvis du har oplevet en alvorlig hændelse, der er forbundet med denne enhed, skal du indberette den til producenten. Hvis du bor i EU, skal du indberette hændelsen til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor du befinder dig.

Dette produkt gør kontaktlinsebrugere i stand til at isætte og/eller udtage deres kontaktlinser, så de kan bruges i henhold til det påtænkte formål. Dette produkt anses derfor for at være et medicinsk udstyr.

### Bortskaffelse af affald

DMV Corporation anbefaler, at brugte DMV-produkter bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser, der er gældende på tidspunktet for bortskaffelse.

Dette produkt er et medicinsk udstyr

Må ikke opbevares ved temperaturer over 105°C  
220°F

Læs brugsanvisningen  
dmvcorp.com

Autoriseret repræsentant

EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK

Beskyttes mod direkte sol

Til enkelt patient - flergangsbrug

Fremstillingsdato

Importør

Fabrikant

Fremstillingsland

Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland

Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA