




dan

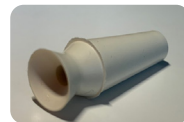

DMV Vented Scleral Cup™

Til hybrid- og sklerale kontaktlinser

Påttænk anvendelse

DMV Vented Scleral Cup er beregnet til isætning af hybrid- og sklerale kontaktlinser.

Brugsanvisning

Før enheden anvendes første gang, renses den med 70 % isopropylalkohol med efterfølgende lufttørring.

Isætning – Der løber en luftkanal gennem enheden til deaktivering af sugning. Dette muliggør, at en kontaktlinse kan anbringes på øjet uden at klæbe til enheden.

Hold enheden i en lodret position, og anbring kontaktlinsen i sugekoppen. Sørg for at fylde linsen med godkendt opløsning ved isætning af hybrid- eller sklerale linser. Løft forsigtigt enheden op til det åbne øje, og lad linsen berøre øjet ved brug af et spejl.

Følg anvisningen fra din kontaktlinsetilpasser/øjneplejerson.

Rensning

DMV Vented Scleral Cup skal hver gang efter brug renses med 70 % isopropylalkohol og efterfølgende lufttørres. Enheden opbevares i dens pakning efter tørring. **Hold luftkanalen fri for materiale.** Planlæg at udskifte den hver 6. måned.

Forsigtighedsforanstaltning: Hvis du utilsigtet anbringer enheden på øjet, kan den blot fjernes fra øjet, da der ingen sugning er. Undgå at lade enheden glide over øjets overflade.

Forsigtig: Produktet må ikke opbevares sammen med væsker, såsom håndcreme, hårgeler, neglelakfjerner og kraftige oxidderingsmidler.

Forsigtig: Kvælningfare. Denne og alle andre medicinske enheder skal opbevares utilgængeligt for små børn. Dette produkt bør ikke anvendes ved sygdom eller skade i øjet. Hvis du får et irriteret øje, en usædvanlig synsforringelse eller smerter, skal du konsultere din øjneplejerson.

Forsigtig: Der er ingen evidens for allergiproblemer med dette produkt, omend det indeholder tørt naturgummi. Det indeholder ikke flydende latex, som er et kendt allergen.

BRUG IKKE denne enhed TIL UDTAGNING af kontaktlinser.

Hvis du har oplevet en alvorlig hændelse, der er forbundet med denne enhed, skal du indberette den til producenten. Hvis du bor i EU, skal du indberette hændelsen til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor du befinder dig.

Dette produkt gør kontaktlinsebrugere i stand til at sætte og/eller udtage deres kontaktlinser, så de kan bruges i henhold til det påttænkte formål. Dette produkt anses derfor for at være et medicinsk udstyr.

Bortskaffelse af affald

DMV Corporation anbefaler, at brugte DMV-produkter bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser, der er gældende på tidspunktet for bortskaffelse.

Dette produkt er et medicinsk udstyr

Må ikke opbevares ved temperaturer over 105°C / 220°F

Læs brugsanvisningen dmvcorp.com

Autoriseret repræsentant

EU
Bilos Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Beskyttes mod direkte sol

Til enkelt patient - flergangsbrug

Fremstillingsdato

Importør

Fabrikant

Fremstillingsland

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Amhem
The Netherlands

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

UK CA