




lav

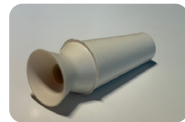

DMV Vented Scleral Cup™

Hibrida un sklēras kontaktlēcām

Paredzētā izmantošana

DMV Vented Scleral Cup ir paredzēts hibrida un sklēras kontaktlēcu ielikšanai.

Lietošanas instrukcija

Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet ierīci ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt.

Ielikšana –Ierīces centrā ir gaisa kanāls, kas nodrošina piesūkšanos. Tādējādi kontaktlēcu iespējams ievietot acī un tā nepielip ierīcei. Turiet ierīci vertikālā stāvoklī un uzlieciet kontaktlēcu uz piesūcekņa kausiņa. Ievietojot hibrida vai sklēras lēcas, neaizmirstiet uzpildīt lēcas ar apstiprinātu šķīdumu. Skatoties spogulī, uzmanīgi paceliet ierīci līdz atvērtajai acij un ar lēcu pieskarieties acij.

Ievērojiet optometrista/acs aprūpes speciālista norādījumus.

Tīrīšana

Pēc katras DMV Vented Scleral Cup izmantošanas reizes notīriet to ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tam dabiskā veidā nožūt. Pēc nožāvēšanas uzglabājiet ierīci futrālī. **Nodrošiniet, lai gaisa kanālā nesakrātos netīrumi.** Iepļānojiēt tās nomaigu reizi sešos mēnešos.



Uzmanību! Ja ierīce nejauši saskaras ar acs virsmu, vienkārši noņemiet to no acs, jo tā nepiesūcās virsmai. Izvairieties no ierīces bīdīšanas pa acs virsmu.



Brīdinājums. Lūdzu, neuzglabājiet šo izstrādājumu tuvumā tādiem šķīdumiem kā roku krēms, matu geli, nagu lakas noņēmējs uz spēcīgi oksidētāji.



Brīdinājums. Aizrīšanās risks. Uzglabājiet šo un visas citas medicīniskās ierīces maziem bērniem nepieejamā vietā. Šo izstrādājumu nav ieteicams lietot bojātās vai traumētās acīs. Ja Jums rodas acs kairinājums, neparasti redzes traucējumi vai sāpes, konsultējieties ar acs aprūpes speciālistu.



Brīdinājums. Lietojot šo izstrādājumu nav ziņots par alerģijām, **tas nesatur sausu dabisko kaučuku. Tas nesatur šķidro lateksu,** kas ir zināms alergēns.



NELIETOJIET šo ierīci kontaktlēcu IZŅEMŠANAI.

Ja Jums rodas jebkāds nopietns negadījums, kas saistīts ar šīs ierīces lietošanu, ziņojiet par to ražotājam. Ja Jūs dzīvojat ES, par negadījumu ziņojiet tās Dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā Jūs pastāvīgi uzturaties.

Izmantojot šo izstrādājumu, kontaktlēcu nēsātāji var ievietot un/vai izņemt kontaktlēcas, lai varētu tās lietot atbilstoši paredzētajam mērķim. Tāpēc šis izstrādājums ir uzskatāms par medicīnisku ierīci.

Atkritumu likvidēšana

DMV Corporation iesaka likvidēt izlietotos DMV izstrādājumus atbilstoši likvidēšanas brīdīt spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem.



Šis izstrādājums ir medicīniska ierīce



Sargāt no tiešas saules gaismas



Importētājs



Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz 105°C/220°F



Vienam pacientam – atkārtotai lietošanai



Ražotājs



Skatīt lietošanas instrukciju dmvcorp.com



Ražošanas datums



Ražošanas valsts



Pilnvarotais pārstāvis



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

