



SWE



Remover end



Inserter end


DMV Versa™

Hjälpmedel för att ta ut/sätta in sklerala kontaktlinser

Avsedd användning

DMV Versa är utformad för att sätta in och ta ut sklerala kontaktlinser.

Bruksanvisning

 Rengör produkten med 70 % isopropylalkohol och låt lufttorka innan du använder den första gången.


UTTAGNING – Fukta sugproppen (smala änden) på DMV Versa med koksaltlösning, för den till ögat och placera den på framsidan av den sklerala kontaktlinsen, nära kanten. Dra försiktigt bort linsen från ögat. Detta leder till att linsen lossnar och släpper från ögat. När du har tagit ut kontaktlinsen, för den försiktigt i sidled från sugproppen.

INSÄTTNING – Placera en fuktig skleral lins på den bredare änden av Versa där linsen fastnar något. Håll ögonlocken öppna med den andra handen och placera den sklerala kontaktlinsen på ögat. Ta ut DMV Versa när linsen har fastnat på ögat. Råfflorna på proppen är utformade för att ge en upphöjd yta som linsen kan vila på och som förhindrar att linsen fastnar på Versa. Använd en spegel som hjälp.


Följ anvisningarna från din optiker.

Rengöring

Rengör produkten med 70 % isopropylalkohol efter varje användning och låt lufttorka. Förvara produkten i fodralet efter torkning. Byt ut den var sjätte månad.

 **Försiktighetsåtgärd:** Om DMV Versa av misstag fastnar på ögat med den smala änden (suggrupp), för den mot ögonvrån och ta bort den genom att vrida. Om DMV Versa av misstag fastnar på ögat med den bredare änden, dra bara bort den från ögat eftersom den inte har någon sugfunktion i denna ände.

 **Varning:** Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor som handkräm, härgel, nagellackbortagningsmedel och kraftigt oxiderande ämnen.

 **Varning: Kvävningrisk.** Förvara denna och andra medicintekniska produkter utom synhåll för barn. Denna produkt rekommenderas inte vid ögonsjukdom eller skadade ögon. Om du får ögonirritation, ovanlig synnedsättning eller smärta, kontakta optiker.

 **Varning:** Det finns inga bevis för allergiska problem med produkten. **Den innehåller torr naturgummi. Den innehåller inte flytande latex, en känd allergen.**

 **Använd INTE DMV Versa för att ta ut MJUKA kontaktlinser eller hybridkontaktlinser.**

Om en allvarlig incident har uppkommit i samband med produkten, rapportera det till tillverkaren. Om du bor i ett EU-land, rapportera händelsen till behörig myndighet i det medlemsland där du bor.

Denna produkt gör det möjligt för kontaktlinsbärare att sätta in och/eller ta ut kontaktlinser för att använda dem enligt avsedd användning. Således anses denna produkt vara en medicinteknisk produkt.

Avfallshantering

DMV Corporation rekommenderar att använda DMV-produkter kasseras i enlighet med lokala anvisningar vid tidpunkten för kassering.



Denna produkt en medicinteknisk produkt



Skyddas mot direkt solljus



Importör



Förvaras vid högst 105°C



En patient – flera användningar



Tillverkare



Läs bruksanvisningen
dmvcorp.com



Tillverkningsdatum



Tillverkningsland



Auktoriserad representant



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

