




lav

DMV Versa™

## Piesūceknis sklēras kontaktlēcu izņemšanai/ielikšanai

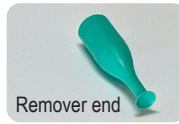

Remover end



Inserter end

## Paredzētā izmantošana

DMV Versa ir paredzēts sklēras kontaktlēcu ielikšanai un izņemšanai.

## Lietošanas instrukcija

Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet ierīci ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt.

Izņemšana – Samitriniet DMV Versa piesūcekņa kausiņu (mazākais gals) ar fizioloģisko šķīdumu, virziet to acī un novietojiet pretī sklēras kontaktlēcai netālu no malas. Lēnām velciet lēcu virzienā prom no acs. Šī darbība vājinās lēcas saasaisti un lēca atbrīvosies no acs. Pēc izņemšanas uzmanīgi noslidiniet kontaktlēcu uz sāniem no piesūcekņa kausiņa.

Ielikšana – Uzlieciet mitro sklēras lēcu uz Versa lielākā gala, kuram lēca nedaudz pieļips. Ar otru roku turiet atvērtus acs plakstiņus un ielieciet sklēras kontaktlēcu acī. Tiklīdz lēca ir pielīpusi acij, izņemiet DMV Versa. Valnīši kausiņā nodrošina piepacceltu vīrsmu, uz kuras balstās lēca, un novērš lēcas pieļipšanu Versa. Lai kontrolētu procesu, skatieties spogulī.

Ievērojiet optometrista/acs aprūpes speciālista norādījumus.

## Tīrīšana

Pēc katras ierīces izmantošanas reizes notīriet to ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt. Pēc nožāvēšanas uzglabājiet ierīci futrālī. Ieplānoiet tās nomaīņu reizi sešos mēnešos.

**Uzmanību!** Ja DMV Versa nejausi pielīp acij ar mazo galu (piesūcekņa kausiņš), bīdīt to uz acs kaktiņu un ar pagrieziena kustību izņemt to. Ja DMV Versa nejausi pielīp pie acs ar lielo galu (atbalsta plāksnīte), vienkārši izņemiet to no acs, jo tā nepiesūcas vīrsmai.**Brīdinājums.** Lūdzu, neuzglabājiet šo izstrādājumu tuvumā tādiem šķīdumiem kā roku krēms, matu geli, nagu lakas noņēmējs uz spēcīgi oksidētāji.**Brīdinājums. Aizrīšanās risks.** Uzglabājiet šo un visas citas medicīniskās ierīces maziem bērniem nepieejamā vietā. Šo izstrādājumu nav ieteicams lietot bojātās vai traumētās acīs. Ja Jums rodas acs kairinājums, neparasti redzes traucējumi vai sāpes, konsultējieties ar acs aprūpes speciālistu.**Brīdinājums.** Lietojot šo izstrādājumu nav ziņots par alerģijām, **tas nesatur sausu dabisko kaučuku. Tas nesatur šķidro lateksu**, kas ir zināms alergēns.**NELIETOJIET DMV Versa MĪKSTO vai hibrīda kontaktlēcu izņemšanai.**

Ja Jums rodas jebkāds nopietns negadījums, kas saistīts ar šīs ierīces lietošanu, ziņojiet par to ražotājam. Ja Jūs dzīvojat ES, par negadījumu ziņojiet tās Dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā Jūs pastāvīgi uzturaties.

Izmantojot šo izstrādājumu, kontaktlēcu nēsātāji var ievietot un/vai izņemt kontaktlēcas, lai varētu tās lietot atbilstoši paredzētajam mērķim. Tāpēc šis izstrādājums ir uzskatāms par medicīnisku ierīci.

## Atkritumu likvidēšana

DMV Corporation iesaka likvidēt izlietotos DMV izstrādājumus atbilstoši likvidēšanas brīdī spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem.



Šis izstrādājums ir medicīniska ierīce



Sargāt no tiešas saules gaismas



Importētājs



Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz 105°C/220°F



Vienam pacientam – atkārtotai lietošanai



Ražotājs

Skatīt lietošanas instrukciju [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)

Ražošanas datums



Ražošanas valsts



Pilnvarotais pārstāvis

EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, AustriaEmergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The NetherlandsSwitzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, SwitzerlandMedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, SwitzerlandUK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UKEmergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UKDMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA