



DMV Classic™

Standiesiems ir dujoms laidies kontaktiniams lęšiams

Numatytas naudojimas

Ši priemonė skirta standiesiems ir dujoms laidies kontaktiniams lęšiams įdėti ir išimti.

Naudojimo instrukcija



Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite priemonę 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore.

Išėmimas – Sudrėpinkite siurbtuką. Užtikrinkite, kad kontaktinis lęšis būtų akies centre. Suspauskite „DMV Classic“ kotelį ir nukreipkite jį į kontaktinio lęšio centrą.

Žiūrėdami į veidrodį, prisilieskite prie kontaktinio lęšio priekinės pusės su siurbimo taure. Kol „DMV Classic“ liečia lęšį, šiek tiek mažiau spauskite kotelį, kad „DMV Classic“ prisisiurbtų prie lęšio. Išimkite lęšį iš akies. Išėmę iš akies, vėl suspauskite kotelį, kad nebesiurbtų ir kontaktinis lęšis atkibtų nuo siurbtukolšėmimas.

Įdėjimas – Uždėkite drėgną kontaktinį lęšį ant siurbtuko nespausdami kotelio. Drėgnas lęšis prikibs prie siurbtuko. Įdėdami lęšį, NESPAUSKITE kotelio. Uždėkite kontaktinį lęšį tiesiai ant akies.

Laikykitės Jūsų kontaktinių lęšių pritaikytojo nurodymų/ akių gydytojo nurodymų.

Valymas

Po kiekvieno „DMV Classic“ naudojimo nuvalykite jį 70 % izopropilo alkoholio ir palikite išdžiūti ore. Išdžiovinę laikykite priemonę jos dėkle. **Užtikrinkite, kad oro kanale nebūtų nuosėdų.** Numatykite ją pakeisti kas šešis mėnesius.



Atsargumo priemonė: jeigu „DMV Classic“ netyčia prikibs prie akies, suspauskite kotelį, kad nebesiurbtų ir išimkite priemonę iš akies.



Įspėjimas: laikykite šią priemonę toliau nuo skysčių, pvz., rankų kremo, plaukų gelio, nagų lako nuėmiklio ir stiprių oksiduojančių medžiagų.



Įspėjimas: užspringimo pavojus. Šią ir kitas medicinos priemones laikykite toliau nuo mažų vaikų. Šios priemonės nerekomenduojama naudoti sergančioms arba pažeistoms akims. Jeigu pajutote akies dirginimą, neįprastą regos sutrikimą arba skausmą, kreipkitės į akių gydytoją.



Įspėjimas: [spėjimas: nors duomenų apie šios priemonės sukeltą alergiją nėra, jos sudėtyje yra sausos natūralios gumos. Jos sudėtyje nėra skysto latekso, kuris yra žinomas alergenai.



NEAUDOKITE „DMV Classic“ MINKŠTIESIEMS arba hibridiniams kontaktiniams lęšiams.

Jeigu patyrėte su šia priemone susijusį sunkų incidentą, praneškite apie tai gamintojui. Jeigu gyvenate ES, apie šį incidentą praneškite kompetentingai valstybės narės institucijai, kurioje gyvenate.

Ši priemonė leidžia kontaktinių lęšių nešiotojams įsidėti ir (arba) išsiimti savo kontaktinius lęšius, kad naudotų juos pagal jų numatytąją paskirtį. Todėl ši priemonė laikoma medicinos priemone.



Ši priemonė yra medicinos priemonė



Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos



Laikyti ne aukštesnėje nei 105 °C temperatūroje



Daugkartinis naudojimas vienam pacientui



Perskaitykite Naudojimo instrukciją
dmvcorp.com



Pagaminimo data



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands