



DMV Soft Lens Handler™

Išėmiklis / įdėjklis minkštiesiems kontaktiniams lėšiams

Numatytas naudojimas

„DMV Soft Lens handler“ skirtas minkštiesiems kontaktiniams lėšiams įdėti ir išimti.

Naudojimo instrukcija



Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite priemonę 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore.

Išėmimas – Tvirtai prispauskite pinceto galiukus prie minkštojo kontaktinio lėšio. Naudodami veidrodį, užtikrinkite, kad lėšis būtų ant ragenos. Šiek tiek suspauskite pinceto galiukus, kad išimtumėte kontaktinį lėšį.

Įdėjimas – Uždėkite drėgną kontaktinį lėšį ant mažojo priemonės galo, kur rodo rodyklė. Lėšis turi užeiti ant priemonės galo, kad galėtumėte matyti dėjimo eigą per lėšį.

Laikykitės Jūsų kontaktinių lėšių pritaikytojo nurodymų/ akių gydytojo nurodymų.

Valymas

Po kiekvieno priemonės naudojimo nuvalykite ją 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore. Išdžiovinę laikykite priemonę jos dėkle. Numatykite ją pakeisti kas šešis mėnesius.



Atsargumo priemonė: Jeigu netyčia pridėsite priemonę prie akies paviršiaus, tiesiog išimkite ją iš akies, nes siurbimo nėra. Neslinkite priemonės per akies paviršių.



Įspėjimas: laikykite šią priemonę toliau nuo skysčių, pvz., rankų kremo, plaukų gėlio, nagų lako nuėmiklio ir stiprių oksiduojančių medžiagų.



Įspėjimas: užspringimo pavojus. Šią ir kitas medicinos priemones laikykite toliau nuo mažų vaikų. Šios priemonės nerekomenduojama naudoti sergančioms arba pažeistoms akims. Jeigu pajutote akies dirginimą, neįprastą regos sutrikimą arba skausmą, kreipkitės į akių gydytoją.



Įspėjimas: [įspėjimas: nors duomenų apie šios priemonės sukeltą alergiją nėra, jos sudėtyje yra sausus natūralios gumos. Jos sudėtyje nėra skysto latekso, kuris yra žinomas alergenai.



NENAUDOKITE šios priemonės standiesiems, dujoms laidiesiems, odenos arba hibridiniams kontaktiniams lėšiams.

Jeigu patyrėte su šia priemone susijusį sunkų incidentą, praneškite apie tai gamintojui. Jeigu gyvenate ES, apie šį incidentą praneškite kompetentingai valstybės narės institucijai, kurioje gyvenate.

Ši priemonė leidžia kontaktinių lėšių nešiotojams įsidėti ir (arba) išsiimti savo kontaktinius lėšius, kad naudotų juos pagal jų numatytąją paskirtį. Todėl ši priemonė laikoma medicinos priemone.



Ši priemonė yra medicinos priemonė



Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos



Laikyti ne aukštesnėje nei 105 °C temperatūroje



Daugkartinis naudojimas vienam pacientui



Perskaitykite Naudojimo instrukciją
2294 dmvcorp.com



Pagaminimo data



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands