



DMV Versa™

## Išėmiklis / įdėjėklicis odenos kontaktiniams lėšiams

### Numatytas naudojimas

„DMV, Versa“ skirtas odenos kontaktiniams lėšiams įdėti ir išimti.

### Naudojimo instrukcija



Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite priemonę 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore.

**Išėmimas** – Sudrėinkite „DMV Versa“ siurbtuką (mažesnę galą) fiziologiniu tirpalu, nukreipkite jį į akį ir uždėkite jį ant odenos kontaktinio lėšio priekio greta krašto. Lėtai traukite lėšį iš akies. Šiuo veiksmu lėšį atkabinsite ir lengvai išimsite iš akies. Išėmę iš akies, atsargiai nuslinkite kontaktinį lėšį į šoną nuo siurbtuko.

**Įdėjimas** – Uždėkite drėgną odenos lėšį ant didžiojo „Versa“ galo, kur lėšis šiek tiek prikibs. Kita ranka prilaikykite atmerktus akių vokus ir uždėkite odenos kontaktinį lėšį ant ragenos. Kai lėšis prikibs prie akies, išimkite „DMV Versa“. Siurbtuko briaunos suformuotos su pakeltu paviršiumi, kuris prilaiko lėšį ir neleidžia jam prikibti prie „Versa“. Naudokite veidrodį, kad būtų lengviau valdyti.

Laikykitės Jūsų kontaktinių lėšių pritaikytojo nurodymų/ akių gydytojo nurodymų.

### Valymas

Po kiekvieno priemonės naudojimo nuvalykite ją 70 % izopropilo alkoholio ir palikite išdžiūti ore. Išdžiovinę laikykite priemonę jos dėkle. Numatykite ją pakeisti kas šešis mėnesius.



**Atsargumo priemonė:** Jeigu „DMV Versa“ netyčia prikibs prie akies mažuoju galu (siurbtuku), nuslinkite ją į akies kraštą ir išimkite priemonę sukdam. Jeigu „DMV Versa“ netyčia prikibs prie akies didžiuoju (atraminiu) galu, tiesiog išimkite ją iš akies, nes šiame gale siurbimo nėra.



**Įspėjimas:** laikykite šią priemonę toliau nuo skysčių, pvz., rankų kremo, plaukų gelio, nagų lako nuėmiklio ir stiprių oksiduojančių medžiagų.



**Įspėjimas: užspringimo pavojus.** Šią ir kitas medicinos priemones laikykite toliau nuo mažų vaikų. Šios priemonės nerekomenduojama naudoti sergančioms arba pažeistoms akims. Jeigu pajutote akies dirginimą, neįprastą regos sutrikimą arba skausmą, kreipkitės į akių gydytoją.



**Įspėjimas:** [spėjimas: nors duomenų apie šios priemonės sukeltą alergiją nėra, **jos sudėtyje yra sausos natūralios gumos. Jos sudėtyje nėra skysto latekso**, kuris yra žinomas alergenai.



**NEAUDOKITE „DMV Versa“ MINKŠTIESIEMS arba hibridiniams kontaktiniams lėšiams išimti.**

Jeigu patyrėte su šia priemone susijusį sunkų incidentą, praneškite apie tai gamintojui. Jeigu gyvenate ES, apie šį incidentą praneškite kompetentingai valstybės narės institucijai, kurioje gyvenate.

Ši priemonė leidžia kontaktinių lėšių nešiotojams įsidėti ir (arba) išsiimti savo kontaktinius lėšius, kad naudotų juos pagal jų numatytąją paskirtį. Todėl ši priemonė laikoma medicinos priemone.



Ši priemonė yra medicinos priemonė



Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos



Laikyti ne aukštesnėje nei 105 °C temperatūroje



Daugkartinis naudojimas vienam pacientui



Perskaitykite Naudojimo instrukciją [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Pagaminimo data



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague; The Netherlands