



## DMV Magic Touch™

### Standiesiems ir dujoms laidies kontaktiniams lęšiams

#### Numatytas naudojimas

Ši priemonė skirta standiesiems ir dujoms laidies kontaktiniams lęšiams įdėti ir išimti.

#### Naudojimo instrukcija

 Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite priemonę 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore.

**Išėmimas** – Sudrėnkinkite siurbtuką. Tvirtai suspauskite kotelio vidurį. Užtikrinkite, kad kontaktinis lęšis būtų akies centre. Naudodami veidrodį, nustatykite siurbtuką priešais lęšį ir prilieskite juo lęšio centrą. Tvirtai suimkite kotelį, kad lęšis prisisiurbtų. Išimkite kontaktinį lęšį iš akies. Išėmę iš akies, atleiskite kotelį, kad nuslinktumėte kontaktinį lęšį nuo siurbtuko.


**Įdėjimas** – Uždėkite drėgną kontaktinį lęšį ant siurbtuko. Drėgnas lęšis prikibs šioje padėtyje. **NESPAUSKITE** kotelio. Uždėkite kontaktinį lęšį tiesiai ant akies.


Laikykitės Jūsų kontaktinių lęšių pritaikytojo nurodymų/ akių gydytojo nurodymų.


#### Valymas

Po kiekvieno „DMV„Magic Touch“ naudojimo nuvalykite jį 70 % izopropilo alkoholio ir palikite išdžiūti ore. Išdžiovinę laikykite priemonę jos dėkle. **Užtikrinkite, kad oro kanale nebūtų nuosėdų.** Numatykite ją pakeisti kas šešis mėnesius.

 **Atsargumo priemonė:** jeigu „DMV Magic Touch“ netyčia prikibs prie akies, atleiskite kotelį ir jį iškris iš akies. Šie priemonė neprikibs prie akies.

 **Įspėjimas:** laikykite šią priemonę toliau nuo skysčių, pvz., rankų kremo, plaukų gelio, nagų lako nuėmiklio ir stiprių oksiduojančių medžiagų.


 **Įspėjimas: užspringimo pavojus.** Šią ir kitas medicinos priemones laikykite toliau nuo mažų vaikų. Šios priemonės nerekomenduojama naudoti sergančioms arba pažeistoms akims. Jeigu pajutote akies dirginimą, neįprastą regos sutrikimą arba skausmą, kreipkitės į akių gydytoją.


 **Įspėjimas:** [įspėjimas: nors duomenų apie šios priemonės sukeltą alergiją nėra, **jos sudėtyje yra sausos natūralios gumos. Jos sudėtyje nėra skysto latekso,** kuris yra žinomas alergenai.

 **NEAUDOKITE „DMV Magic Touch“ MINKŠTIESIEMS arba hibridiniams kontaktiniams lęšiams.**


Jeigu patyrėte su šia priemone susijusį sunkų incidentą, praneškite apie tai gamintojui. Jeigu gyvenate ES, apie šį incidentą praneškite kompetentingai valstybės narės institucijai, kurioje gyvenate.


Ši priemonė leidžia kontaktinių lęšių nešiotojams įsidėti ir (arba) išsiimti savo kontaktinius lęšius, kad naudotų juos pagal jų numatytąją paskirtį. Todėl ši priemonė laikoma medicinos priemone.

 Ši priemonė yra medicinos priemonė

 Laikyti ne aukštesnėje nei 105 °C / 220 °F temperatūroje

 Perskaitykite Naudojimo instrukciją [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)

 Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos

 Daugkartinis naudojimas vienam pacientui

 Pagaminimo data



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague; The Netherlands