



DMV Scleral Cup™

Odenos kontaktiniams lęšiams ir akių protezams

Numatytas naudojimas

„DMV Scleral Cup“ skirtas odenos kontaktiniams lęšiams įdėti / išimti bei akių protezams išimti.

Naudojimo instrukcija



Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite priemonę 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore.

Išėmimas – Sudrėkinkite siurbtuką ir suspauskite kotelį. Naudodami veidrodį, nustatykite siurbtuką priešais odenos kontaktinį lęšį. Atleiskite kotelį, kad kontaktinis lęšis prisisiurbtų. Tada kontaktiniu lęšiu galima manipuluoti taip, kad jį būtų galima išimti iš akies. Laikykitės Jūsų kontaktinių lęšių pritaikytojo nurodymų, kad naudotumėte tinkamiausią metodą. Išėmę iš akies, vėl suspauskite kotelį, kad nebesiurbtų ir kontaktinis lęšis atkibtų nuo siurbtuko.

Įdėjimas – Uždėkite drėgną kontaktinį lęšį ant siurbtuko nespausdami kotelio. Drėgnas lęšis prikibs prie siurbtuko. Įdėdami lęšį, NESPAUSKITE kotelio. Atsargiai įdėkite odenos lęšį į atmerktą akį.

Laikykitės Jūsų kontaktinių lęšių pritaikytojo nurodymų/ akių gydytojo nurodymų.

Valymas

Po kiekvieno „DMV Scleral Cup“ naudojimo nuvalykite jį 70 % izopropilo alkoholio ir palikite išdžiūti ore. Išdžiovinę laikykite priemonę jos dėkle. Užtikrinkite, kad oro kanale nebūtų nuosėdų. Numatykite ją pakeisti kas šešis mėnesius.



Atsargumo priemonė: jeigu „DMV Scleral Cup“ netyčia prikibs prie akies, šiek tiek suspauskite kotelį, kad nebesiurbtų ir išimkite priemonę iš akies.



Įspėjimas: laikykite šią priemonę toliau nuo skysčių, pvz., rankų kremo, plaukų gelio, nagų lako nuėmiklio ir stiprių oksiduojančių medžiagų.



Įspėjimas: užspringimo pavojus. Šią ir kitas medicinos priemones laikykite toliau nuo mažų vaikų. Šios priemonės nerekomenduojama naudoti sergančioms arba pažeistoms akims. Jeigu pajutote akies dirginimą, neįprastą regos sutrikimą arba skausmą, kreipkitės į akių gydytoją.



Įspėjimas: Įspėjimas: nors duomenų apie šios priemonės sukeltą alergiją nėra, **jos sudėtyje yra sausos natūralios gumos. Jos sudėtyje nėra skysto latekso**, kuris yra žinomas alergenai.



NEAUDOKITE „DMV Scleral Cup“ MINKŠTIESIEMS arba hibridiniams kontaktiniams lęšiams.

Jeigu patyrėte su šia priemone susijusį sunkų incidentą, praneškite apie tai gamintojui. Jeigu gyvenate ES, apie šį incidentą praneškite kompetentingai valstybės narės institucijai, kurioje gyvenate.

Ši priemonė leidžia kontaktinių lęšių nešiotojams įsidėti ir (arba) išsiimti savo kontaktinius lęšius, kad naudotų juos pagal jų numatytąją paskirtį. Todėl ši priemonė laikoma medicinos priemone.



Ši priemonė yra medicinos priemonė



Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos



Laikyti ne aukštesnėje nei 105 °C temperatūroje



Daugkartinis naudojimas vienam pacientui



Perskaitykite Naudojimo instrukciją dmvcorp.com



Pagaminimo data



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands