



DMV Ultra™ / DMV 45™

Per applicare e rimuovere lenti a contatto rigide e gas-permeabili.

Utilizzazione

DMV Ultra e DMV 45 sono adatti per applicare e rimuovere lenti a contatto rigide e permeabili al gas. Tenere il DMV Ultra in posizione verticale e il DMV 45 ad un angolo di circa 45°.

Istruzioni per l'uso



Prima di utilizzare il DMV Ultra / DMV 45 per la prima volta, pulirlo con alcool isopropilico al 70% e lasciarlo asciugare all'aria.

RIMUOVERE – Inumidire la superficie della ventosina del DMV Ultra/DMV 45 con soluzione salina e portarlo verso l'occhio. Assicurarsi che la lente a contatto sia centrata davanti alla pupilla. Posizionare la superficie della ventosina in modo parallelo e centrato sulla superficie della lente a contatto mentre si guarda in uno specchio. Rimuovere la lente a contatto allontanando l'applicatore dall'occhio. Per rimuovere la lente a contatto dalla ventosina tirare la lente a contatto lateralmente dall'applicatore.

INSERIMENTO – Posizionare la lente a contatto umida nell'incavo piatto all'estremità più stretta dell'applicatore. La lente a contatto umida resterà attaccata. Portare l'applicatore con la lente a contatto verso l'occhio e posizionarlo con cautela al centro della cornea davanti alla pupilla.

Seguire le indicazioni dell'installatore di lenti a contatto / dell'oculista professionale.

Istruzioni per la pulizia

Dopo ogni utilizzo pulire la DMV Ultra / DMV 45 con alcool isopropilico al 70% e lasciare asciugare all'aria. Riporre il dispositivo nella sua custodia dopo l'asciugatura. Sostituire l'applicatore dopo 6 mesi.



Attenzione: Se il DMV Ultra / DMV 45 tocca e aderisce accidentalmente alla superficie dell'occhio, premere la maniglia per rilasciare l'aspirazione e rimuovere il prodotto dall'occhio.



Attenzione: Tenere la DMV Ultra / DMV 45 lontano da crema per le mani, gel per capelli, distaccante per smalto e forti sostanze ossidanti



Attenzione: Rischio di soffocamento per i bambini piccoli. Tenere questo e tutti gli altri dispositivi medici lontano dalla portata dei bambini piccoli. Si raccomanda di non utilizzare questo prodotto su occhi malati o feriti. Per irritazione agli occhi, problemi di vista insoliti o dolore, contattare il proprio specialista di lenti a contatto o oculista.



Attenzione: Nonostante non ci siano indicazioni di allergie, la DMV Corporation avvisa che questo **prodotto è realizzato in gomma naturale secca. Il materiale non contiene lattice liquido** noto come allergene.



N'utilisez pas DMV Ultra / DMV 45 pour les lentilles de contact souples ou hybrides.

Se si è verificato un incidente grave in relazione a questo dispositivo, segnalarlo al produttore. Se risiedi nell'UE, segnala l'incidente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedi.

Questo prodotto consente ai portatori di lenti a contatto di inserire e / o rimuovere le lenti a contatto per utilizzarle secondo lo scopo previsto. Pertanto è considerato un dispositivo medico.



Dispositivo medico



Proteggere dal sole diretto



Non conservare a temperatura superiore a 105 ° C / 220 ° F



Singolo paziente – uso multiplo



Seguire le istruzioni per l'uso dmvcorp.com



Data di produzione



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague;
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

UK RP

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA