



DMV Ultra™ / DMV 45™

Standiesiems ir dujoms laidies kontaktiniams lęšiams

Numatytas naudojimas

„DMV Ultra“ ir „DMV 45“ skirti standiesiems ir dujoms laidies kontaktiniams lęšiams įdėti ir išimti „DMV Ultra“ reikia laikyti stačia, o „DMV 45“ reikia laikyti kampu.

Naudojimo instrukcija



Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite priemonę 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore.

Išėmimas – Sudrėkinkite „DMV Ultra“ / „DMV 45“ siurbtuką ir nukreipkite jį į akį. Užtikrinkite, kad kontaktinis lęšis būtų akies centre. Naudodami veidrodį, nustatykite siurbtuką priešais lęšį ir prilieskite juo lęšio centrą. Išimkite kontaktinį lęšį iš akies. Išėmę iš akies, atsargiai nuslinkite kontaktinį lęšį į šoną nuo siurbtuko.

Įdėjimas – Uždėkite drėgną kontaktinį lęšį ant siaurajame kotelio gale esančios mažos įdubos. Drėgnas lęšis prikibs šioje padėtyje. Prilieskite lęšį prie akies.

Laikykitės Jūsų kontaktinių lęšių pritaikytojo nurodymų/ akių gydytojo nurodymų.

Valymas

Po kiekvieno „DMV Ultra“ / „DMV 45“ naudojimo nuvalykite jį 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore. Išdžiovinę laikykite priemonę jos dėkle. Numatykite ją pakeisti kas šešis mėnesius.



Atsargumo priemonė: jeigu priemonė netyčia prikibs prie akies, nuslinkite ją į akies kraštą ir išimkite priemonę sukdami.



Įspėjimas: laikykite šią priemonę toliau nuo skysčių, pvz., rankų kremo, plaukų gelio, nagų lako nuėmiklio ir stiprių oksiduojančių medžiagų.



Įspėjimas: užspringimo pavojus. Šią ir kitas medicinos priemones laikykite toliau nuo mažų vaikų. Šios priemonės nerekomenduojama naudoti sergančioms arba pažeistoms akims. Jeigu pajutote akies dirginimą, neįprastą regos sutrikimą arba skausmą, kreipkitės į akių gydytoją.



Įspėjimas: [įspėjimas: nors duomenų apie šios priemonės sukeltą alergiją nėra, jos sudėtyje yra sausos natūralios gumos. Jos sudėtyje nėra skysto latekso, kuris yra žinomas alergenai.



NEAUDOKITE „DMV Ultra“ / „DMV 45“ MINKŠTIESIEMS arba hibridiniams kontaktiniams lęšiams.

Jeigu patyrėte su šia priemone susijusį sunkų incidentą, praneškite apie tai gamintojui. Jeigu gyvenate ES, apie šį incidentą praneškite kompetentingai valstybės narės institucijai, kurioje gyvenate.

Ši priemonė leidžia kontaktinių lęšių nešiotojams įsidėti ir (arba) išsiimti savo kontaktinius lęšius, kad naudotų juos pagal jų numatytąjį paskirtį. Todėl ši priemonė laikoma medicinos priemone.



Ši priemonė yra medicinos priemonė



Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos



Laikyti ne aukštesnėje nei 105 °C temperatūroje



Daugkartinis naudojimas vienam pacientui



Perskaitykite Naudojimo instrukciją dmvcorp.com



Pagaminimo data



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands