



DMV Vented Scleral Cup™

Hibridiniams ir odenos kontaktiniams lęšiams

Numatytas naudojimas

„DMV Vented Scleral Cup“ skirtas hibridiniams ir odenos kontaktiniams lęšiams įdėti.

Naudojimo instrukcija



Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite priemonę 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore.

Įdėjimas – Per visą priemonę eina oro kanalas siurbimui išjungti. Tai leidžia uždėti kontaktinį lęšį ant akies, jam neprikimbant prie priemonės. Laikydami priemonę vertikaliajoje padėtyje, įdėkite kontaktinį lęšį į siurbiklį. Įdėdami hibridinius arba odenos lęšius, būtina užpildykite lęšį patvirtintu tirpalu. Atsargiai pakelkite priemonę iki atmerktos akies ir, naudodami veidrodį, prilieskite lęšiu akį.

Laikykitės Jūsų kontaktinių lęšių pritaikytojo nurodymų/ akių gydytojo nurodymų.

Valymas

Po kiekvieno „DMV Vented Scleral Cup“ naudojimo nuvalykite jį 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore. Išdžiovinę laikykite priemonę jos dėkle. **Užtikrinkite, kad oro kanale nebūtų nuosėdų.** Numatykite ją pakeisti kas šešis mėnesius.



Atsargumo priemonė: Jeigu netyčia pridedate priemonę prie akies paviršiaus, tiesiog išimkite ją iš akies, nes siurbimo nėra. Neslinkite priemonės per akies paviršių.



Įspėjimas: laikykite šią priemonę toliau nuo skysčių, pvz., rankų kremo, plaukų gelio, nagų lako nuėmiklio ir stiprių oksiduojančių medžiagų.



Įspėjimas: užspringimo pavojus. Šią ir kitas medicinos priemones laikykite toliau nuo mažų vaikų. Šios priemonės nerekomenduojama naudoti sergančioms arba pažeistoms akims. Jeigu pajutote akies dirginimą, neįprastą regos sutrikimą arba skausmą, kreipkitės į akių gydytoją.



Įspėjimas: Įspėjimas: nors duomenų apie šios priemonės sukeltą alergiją nėra, **jos sudėtyje yra sausos natūralios gumos. Jos sudėtyje nėra skysto latekso,** kuris yra žinomas alergenai.



NEAUDOKITE šios priemonės kontaktiniams lęšiams IŠIMTI.

Jeigu patyrėte su šia priemone susijusį sunkų incidentą, praneškite apie tai gamintojui. Jeigu gyvenate ES, apie šį incidentą praneškite kompetentingai valstybės narės institucijai, kurioje gyvenate.

Ši priemonė leidžia kontaktinių lęšių nešiotojams įsidėti ir (arba) išsiimti savo kontaktinius lęšius, kad naudotų juos pagal jų numatytąją paskirtį. Todėl ši priemonė laikoma medicinos priemone.



Ši priemonė yra medicinos priemonė



Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos



Laikyti ne aukštesnėje nei 105 °C / 220 °F temperatūroje



Daugkartinis naudojimas vienam pacientui



Perskaitykite Naudojimo instrukciją dmvcorp.com



Pagaminimo data



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands