




ita

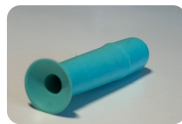

DMV CLASSIC™

Per applicare e rimuovere lenti a contatto rigide e gas-permeabili.

Utilizzazione

DMV Classic è adatto per indossare e togliere lenti a contatto rigide (dimensionalmente stabili) e permeabili ai gas..

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare il DMV Classic per la prima volta, pulirlo con alcool isopropilico al 70% e lasciarlo asciugare all'aria.

RIMUOVERE – Inumidire la superficie della ventosina con soluzione salina. Assicurarsi che la lente a contatto sia centrata davanti alla pupilla. Premere bene il centro del manico e portare l'applicatore verso l'occhio. Posizionare la superficie della ventosina in modo parallelo e centrato sulla superficie della lente a contatto mentre si guarda in uno specchio. Mentre la ventosina tocca la superficie della lente a contatto ridurre la pressione sul manico dell'applicatore per aspirare la lente. Rimuovere la lente a contatto dall'occhio. Dopo aver rimosso la lente a contatto premere nuovamente il manico dell'applicatore per rilasciare l'effetto di aspirazione. Ora è possibile rimuovere la lente a contatto dalla ventosina.

INSERIMENTO – Posizionare la lente a contatto umida sulla ventosina senza premere il manico dell'applicatore. La lente a contatto umida resterà attaccata. Tenere l'applicatore senza premere il manico. Portare l'applicatore con la lente a contatto verso l'occhio e posizionarlo con cautela al centro della cornea davanti alla pupilla.

Seguire le indicazioni dell'installatore di lenti a contatto / dell'oculista professionale.

Istruzioni per la pulizia

Dopo ogni utilizzo pulire la DMV Classic con alcool isopropilico al 70% e lasciare asciugare all'aria. Riporre il dispositivo nella sua custodia dopo l'asciugatura. Mantenere il canale dell'aria libero da detriti. Sostituire l'applicatore dopo 6 mesi.

Attenzione: Se il DMV Classic tocca e aderisce accidentalmente alla superficie dell'occhio, premere la maniglia per rilasciare l'aspirazione e rimuovere il prodotto dall'occhio.

Attenzione: Tenere la DMV Ultra / DMV 45 lontano da crema per le mani, gel per capelli, distaccante per smalto e forti sostanze ossidanti

Attenzione: Rischio di soffocamento per i bambini piccoli. Tenere questo e tutti gli altri dispositivi medici lontano dalla portata dei bambini piccoli. Si raccomanda di non utilizzare questo prodotto su occhi malati o feriti. Per irritazione agli occhi, problemi di vista insoliti o dolore, contattare il proprio specialista di lenti a contatto o oculista.

Attenzione: Nonostante non ci siano indicazioni di allergie, la DMV Corporation avvisa che questo prodotto è realizzato in gomma naturale secca. Il materiale non contiene lattice liquido noto come allergene.

N'utilisez pas DMV Classic pour les lentilles de contact souples ou hybrides.

Se si è verificato un incidente grave in relazione a questo dispositivo, segnalarlo al produttore. Se risiedi nell'UE, segnala l'incidente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedi.

Questo prodotto consente ai portatori di lenti a contatto di inserire e / o rimuovere le lenti a contatto per utilizzarle secondo lo scopo previsto. Pertanto è considerato un dispositivo medico.

Smaltimento dei rifiuti

DMV Corporation consiglia di smaltire i prodotti DMV usati secondo le normative locali in vigore al momento dello smaltimento.

Dispositivo medico

Non conservare a temperatura superiore a 105 ° C / 220 ° F

Seguire le istruzioni per l'uso dmvcorp.com

Rappresentante autorizzato

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Proteggere dal sole diretto

Singolo paziente – uso multiplo

Data di produzione

Importatore

Produttore

Paese di Produzione

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

