



lav



## DMV Classic™

### Cietajām un gāzi caurlaidīgajām kontaktlēcām

#### Paredzētā izmantošana

Šī ierīce ir paredzēta cieto un gāzi caurlaidīgo kontaktlēcņu ielikšanai un izņemšanai.

#### Lietošanas instrukcija

Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet ierīci ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt.

Izņemšana – Samitriniet piesūcekņa kausiņu. Pārlicinieties, ka kontaktlēca atrodas acs centrā. Saspiediet DMV Classic piesūcekņa kātiņu un tuviniet to kontaktlēcas centram. Skatoties spogulī, pieskarieties ar to lēcas priekšpusei. Tiklīdz DMV Classic piesūceknis pieskaras lēcai, atlaidiet nedaudz vairāk kātiņu, lai DMV Classic piesūceknis pieļiptu lēcai. Izņemiet kontaktlēcu no acs. Pēc izņemšanas vēlreiz spiediet kātiņu, lai likvidētu piesūckšanos un izņemtu lēcu no piesūcekņa kausiņa.

Ielikšana– Uzlieciet mitro kontaktlēcu uz kausiņa, nesaspiežot kātiņu. Mitrā lēca pielips kausiņam. Ievietojot lēcu, NESASPIEDIET kātiņu. Ielieciet kontaktlēcu tieši acī.

Ievērojiet optometrista/acs aprūpes speciālista norādījumus.

#### Tīrīšana

Pēc katras DMV Classic izmantošanas reizes notīriet to ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tam dabiskā veidā nožūt. Pēc nožāvēšanas uzglabājiet ierīci futrālī.

**Nodrošiniet, lai gaisa kanālā nesakrātos netīrumi.** Ieplānojiet tās nomaīņu reizi sešos mēnešos.

**Uzmanību!** Ja DMV Classic nejausi pielip acij, spiediet kātiņu, lai likvidētu piesūckšanos, un izņemiet to no acs.

**Bridinājums.** Lūdzu, neuzglabājiet šo izstrādājumu tuvumā tādiem šķidrumiem kā roku krēms, matu geli, nagu lakas noņēmējs un spēcīgi oksidētāji.

**Bridinājums. Aizrīšanās risks.** Uzglabājiet šo un visas citas medicīniskās ierīces maziem bērniem nepieejamā vietā. Šo izstrādājumu nav ieteicams lietot bojātās vai traumētās acīs. Ja Jums rodas acs kairinājums, neparasti redzes traucējumi vai sāpes, konsultējieties ar acs aprūpes speciālistu.

**Bridinājums.** Lietojot šo izstrādājumu nav ziņots par alerģijām, **tas nesatur sausu dabisko kaučuku. Tas nesatur šķidro lateksu**, kas ir zināms alergēns.

**NELIETOJIET DMV Classic MĪKSTAJĀM vai hibrīda kontaktlēcām.**

Ja Jums rodas jebkāds nopietns negadījums, kas saistīts ar šīs ierīces lietošanu, ziņojiet par to ražotājam. Ja Jūs dzīvojat ES, par negadījumu ziņojiet tās Dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā Jūs pastāvīgi uzturaties.

Izmantojot šo izstrādājumu, kontaktlēcu nēsātāji var ievietot un/vai izņemt kontaktlēcas, lai varētu tās lietot atbilstoši paredzētajam mērķim. Tāpēc šis izstrādājums ir uzskatāms par medicīnisku ierīci.

#### Atkritumu likvidēšana

DMV Corporation iesaka likvidēt izlietotos DMV izstrādājumus atbilstoši likvidēšanas brīdī spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem.



Šis izstrādājums ir medicīniska ierīce



Sargāt no tiešas saules gaismas



Importētājs



Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz 105°C/220°F



Vienam pacientam – atkārtotai lietošanai



Ražotājs



Skatīt lietošanas instrukciju dmvcorp.com



Ražošanas datums



Ražošanas valsts

Pārveidots pārstāvis



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

