



dan



DMV Luma Serter Plus™

Luminous Inserter til store linser

På-tænkt anvendelse

DMV Luma-Serter Plus er beregnet til isætning af kontaktlinser med en større diameter end 13 mm. Den kan anvendes til sklerale, bløde, hybrid- eller gasgennemtrængelige (faste) kontaktlinser.

Brugsanvisning

Før enheden anvendes første gang, renses den med 70 % isopropylalkohol med efterfølgende lufttørring.

Isætning – Placer enheden på lys-enden af en penlygte. Anbring kontaktlinser i midten af koppen. Følg anvisningen for linseklargøring fra din øjenplejerson. Tænd for penlygten, og bevæg forsigtigt linsen mod det åbne øje ved brug af det belyste centrum i koppen som ledetråd. Hold øjenlågene åbne med den anden hånd, og anbring linsen på hornhinden. Når linsen er klæbet fast til øjet, fjernes Luma-Serter Plus. Lysfilteret forhindrer, at kontaktlinseopløsninger passerer gennem til penlygten. Enheden har en kontur, så den passer til enden af de fleste penlygter.

Hvis patienter foretrækker det, kan de anbringe enheden på spidsen af en finger i stedet for en penlygte.

Ribberne i koppen er beregnet til at tilvejebringe en hævet overflade, som linsen kan hvile på og forhindrer, at linsen klæber til Luma-Serter Plus.

Følg anvisningen fra din kontaktlinse til passer/øjneplejerson.

Rensning

Enheden skal hver gang efter brug renses med 70 % isopropylalkohol og efterfølgende lufttørres. Enheden opbevares i dens pakning efter tørring. Planlæg at udskifte den hver 6. måned. Enheden skal hver gang efter brug renses med 70 % isopropylalkohol og efterfølgende lufttørres. Enheden opbevares i dens pakning efter tørring. Planlæg at udskifte den hver 6. måned.

Forsigtighedsforanstaltning: Hvis du utilsigtet anbringer enheden på øjet, kan den blot fjernes fra øjet, da der ingen sugning er. Undgå at lade enheden glide over øjets overflade.

Forsigtig: Produktet må ikke opbevares sammen med væsker, såsom håndcreme, hængeler, neglelakfjerner og kraftige oxidideringsmidler.

Forsigtig: Kvælningsfare. Denne og alle andre medicinske enheder skal opbevares utilgængeligt for små børn. Dette produkt bør ikke anvendes ved sygdom eller skade i øjet. Hvis du får et irriteret øje, en usædvanlig synsforringelse eller smerter, skal du konsultere din øjenplejerson.

Forsigtig: Der er ingen evidens for allergiproblemer med dette produkt, omend det indeholder tørt naturgummi. Det indeholder ikke flydende latex, som er et kendt allergen.

BRUG IKKE Luma-Serter Plus til kontaktlinser, der er mindre end 12,5 mm, for at undgå at berøre øjets overflade.

Hvis du har oplevet en alvorlig hændelse, der er forbundet med denne enhed, skal du indberette den til producenten. Hvis du bor i EU, skal du indberette hændelsen til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor du befinder dig.

Dette produkt gør kontaktlinsebrugere i stand til at isætte og/eller udtage deres kontaktlinser, så de kan bruges i henhold til det påtænkte formål. Dette produkt anses derfor for at være et medicinsk udstyr.

Bortskaffelse af affald

DMV Corporation anbefaler, at brugte DMV-produkter bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser, der er gældende på tidspunktet for bortskaffelse.

Dette produkt er et medicinsk udstyr

Må ikke opbevares ved temperaturer over 105°C / 220°F

Læs brugsanvisningen dmvcorp.com

Autoriseret repræsentant

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Beskyttes mod direkte sol

Til enkelt patient - flergangsbrug

Fremstillingsdato

Importør

Fabrikant

Fremstillingsland

Emergo Europe
Westervoortsewijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr:360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

