



lav



DMV Luma-Serter Plus™

Appgaismots piesūcekņis lielajām lēcām

Paredzētā izmantošana

DMV Luma-Serter Plus ir paredzēts tādu kontaktlēcu ielikšanai, kuru diametrs ir lielāks par 13 mm. To var izmantot sklēras, mīkstajām, hibrīda un gāzi caurlaidīgajām (stingrajām) kontaktlēcām.

Lietošanas instrukcija

Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet ierīci ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt.

Ielikšana – Uzlieciet ierīci uz gaismas pildspalvas apgaismotā gala. Uzlieciet kontaktlēcu kausiņa centrā. Ievērojiet lēcas sagatavošanas norādījumus, ko Jums sniedzis acs aprūpes speciālists. Ieslēdziet gaismas pildspalvu un uzmanīgi virziet lēcu atvērtās acs virzienā, vadoties pēc kausiņa izgaismotā centra. Ar otru roku turiet atvērtus acs plakstiņus un uzlieciet lēcu uz radzenes. Tiklīdz lēca ir pielīpusi acij, izņemiet Luma-Serter Plus. Gaismas filtrs neļauj kontaktlēcas šķīdumiem plūst cauri gaismas pildspalvai.

Ierīces forma atbilst vairumam gaismas pildspalvu galu. Ja pacients tā vēlas, viņš var uzlikt ierīci uz pirksta gala, nevis gaismas pildspalvas.

Valnīši kausiņos nodrošina piepacceltu virsmu, uz kuras balstās lēca, un novērš lēcas pielīšanu Luma-Serter Plus.

Ievērojiet optometrista/acs aprūpes speciālista norādījumus.

Tīrīšana

Pēc katras ierīces izmantošanas reizes notīriet to ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt. Pēc nožāvēšanas uzglabājiet ierīci futrālī. Iepļānojiēt tās nomaīņu reizi sešos mēnešos.



Uzmanību! Ja ierīce nejauši saskaras ar acs virsmu, vienkārši izņemiet to no acs, jo tā nepiesūcās virsmai. Izvairieties no ierīces bīdīšanas pa acs virsmu.



Brīdinājums. Lūdzu, neuzglabājiet šo izstrādājumu tuvumā tādiem šķīdriem kā roku krēms, matu geli, nagu lakas noņēmējs uz spēcīgi oksidētāji.



Brīdinājums. Aizrīšanās risks. Uzglabājiet šo un visas citas medicīniskās ierīces maziem bērniem nepieejamā vietā. Šo izstrādājumu nav ieteicams lietot bojātās vai traumētās acīs. Ja Jums rodas acs kairinājums, neparasti redzes traucējumi vai sāpes, konsultējieties ar acs aprūpes speciālistu.



Brīdinājums. Lietojot šo izstrādājumu nav ziņots par alerģijām, **tas nesatur sausu dabisko kaučuku. Tas nesatur šķidro lateksu**, kas ir zināms alerģēns.



NELIETOJIET Luma-Serter Plus kopā ar kontaktlēcām, kuras ir mazākas par 12,5 mm, lai izvairītos no pieskaršanās acs virsmai.

Ja Jums rodas jebkāds nopietns negadījums, kas saistīts ar šīs ierīces lietošanu, ziņojiet par to ražotājam. Ja Jūs dzīvojat ES, par negadījumu ziņojiet tās Dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā Jūs pastāvīgi uzturaties.

Izmantojot šo izstrādājumu, kontaktlēcu nēsātāji var ievietot un/vai izņemt kontaktlēcas, lai varētu tās lietot atbilstoši paredzētajam mērķim. Tāpēc šis izstrādājums ir uzskatāms par medicīnisku ierīci.

Atkritumu likvidēšana

DMV Corporation iesaka likvidēt izlietotos DMV izstrādājumus atbilstoši likvidēšanas brīdī spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem.



Šis izstrādājums ir medicīniska ierīce



Sargāt no tiešas saules gaismas



Importētājs



Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz 105°C/220°F



Vienam pacientam – atkārtotai lietošanai



Ražotājs



Skatīt lietošanas instrukciju dmvcorp.com



Ražošanas datums



Ražošanas valsts



Pilnvarotais pārstāvis



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

