



SWE




DMV Luma Serter Plus™

Hjälpmedel (upplyst) för att sätta in stora linsor

Avsedd användning

DMV Luma-Serter Plus är utformad för att sätta in kontaktlinser som har en diameter som överstiger 13 mm. Den kan användas för sklerala kontaktlinser, mjuka kontaktlinser, hydridkontaktlinser eller syre genomträngliga kontaktlinser.

Bruksanvisning


 Rengör produkten med 70 % isopropylalkohol och låt lufttorka innan du använder den första gången.


INSÄTTNING – Placera produkten på änden av en pennlampan. Placera kontaktlinsen på sugproppen. Följ optikers anvisningar för förberedelse av linsen. Slå på pennlampan och försiktigt linsen mot det öppna ögat med hjälp av den upplysta mittersta delen av proppen som hjälpmedel. Håll ögonlocken öppna med den andra handen och placera linsen på hornhinnan. Ta ut Luma-Serter Plus när linsen har fastnat på ögat. Ljusfiltret förhindrar att kontaktlinslösningen når pennlampan. Produkten är utformad för att passa änden på den flesta pennlampor. Produkten kan placeras på en fingertopp istället för på pennlampan. Råflora på proppen är utformade för att ge en upphöjd yta som linsen kan vila på och som förhindrar att linsen fastnar på Luma-Serter Plus.


Följ anvisningarna från din optiker.

Rengöring

Rengör produkten med 70 % isopropylalkohol efter varje användning och låt lufttorka. Förvara produkten i fodralet efter torkning. Byt ut den var sjätte månad.

 **Försiktighetsåtgärd:** Om du av misstag applicerar produkten på ögats yta, dra bara bort den eftersom den inte har någon sugfunktion. För inte produkten över ögats yta.

 **Varning:** Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor som handkräm, härgel, nagellackbortagningsmedel och kraftigt oxiderande ämnen.

 **Varning: Kvävningrisk.** Förvara denna och andra medicintekniska produkter utom synhåll för barn. Denna produkt rekommenderas inte vid ögonsjukdom eller skadade ögon. Om du får ögonirritation, ovanlig synnedläggelse eller smärta, kontakta optiker.

 **Varning:** Det finns inga bevis för allergiska problem med produkten. **Den innehåller torr naturgummi. Den innehåller inte flytande latex, en känd allergen.**

 **ANVÄND INTE Luma-Serter Plus med kontaktlinser som är mindre än 12,5 mm, för att förhindra beröring av ögats yta.**

Om en allvarig incident har uppkommit i samband med produkten, rapportera det till tillverkaren. Om du bor i ett EU-land, rapportera händelsen till behörig myndighet i det medlemsland där du bor.

Denna produkt gör det möjligt för kontaktlinsebärare att sätta in och/eller ta ut kontaktlinser för att använda dem enligt avsedd användning. Således anses denna produkt vara en medicinteknisk produkt.

Avfallshandling

DMV Corporation rekommenderar att använda DMV-produkter kasseras i enlighet med lokala anvisningar vid tidpunkten för kassering.



Denna produkt är en medicinteknisk produkt



Skyddas mot direkt solljus



Importör



Förvaras vid högst 105°C



En patient – flera användningar



Tillverkare



Läs bruksanvisningen
dmvcorp.com



Tillverkningsdatum



Tillverkningsland



Auktoriserad representant



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

