



SWE



DMV Soft Lens Handler™

Hjälpmedel för att ta ut/sätta in mjuka kontaktlinser

Avsedd användning

DMV Soft Lens Handler är utformad för att sätta in och ta ut mjuka kontaktlinser.

Bruksanvisning

Rengör produkten med 70 % isopropylalkohol och låt lufttorka innan du använder den första gången.

UTTAGNING – Tryck ihop hållaren ordentligt mot framsidan av den mjuka kontaktlinsen. Kontrollera att linsen sitter på hornhinnan med hjälp av en spegel. Tryck försiktigt ihop hållaren för att ta ut kontaktlinsen.

INSÄTTNING – Placera en fuktig kontaktlinsen på den smala änden av produkten där pilen visar. Låt linsen överlappa änden på produkten så att du kan se insättningen genom linsen.

Följ anvisningarna från din optiker.

Rengöring

Rengör produkten med 70 % isopropylalkohol efter varje användning och låt lufttorka. Förvara produkten i fodralet efter torkning. Byt ut den var sjätte månad.

Försiktighetsåtgärd: Om du av misstag applicerar produkten på ögats yta, dra bara bort den eftersom den inte har någon sugfunktion. För inte produkten över ögats yta.

Varning: Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor som handkräm, hårgel, nagellackborttagningsmedel och kraftigt oxiderande ämnen.

Varning: Kvävningrisk. Förvara denna och andra medicintekniska produkter utom synhåll för barn. Denna produkt rekommenderas inte vid ögonsjukdom eller skadade ögon. Om du får ögonirritation, ovanlig synnedläggelse eller smärta, kontakta optiker.

Varning: Det finns inga bevis för allergiska problem med produkten. **Den innehåller torr naturgummi. Den innehåller inte flytande latex, en känd allergen.**

ANVÄND INTE denna produkt med hårda, syregenomsläppliga eller sklerala kontaktlinser eller hybridkontaktlinser.

Om en allvarig incident har uppkommit i samband med produkten, rapportera det till tillverkaren. Om du bor i ett EU-land, rapportera händelsen till behörig myndighet i det medlemsland där du bor.

Denna produkt gör det möjligt för kontaktlinsbärare att sätta in och/eller ta ut kontaktlinser för att använda dem enligt avsedd användning. Således anses denna produkt vara en medicinteknisk produkt.

Avfallshandling

DMV Corporation rekommenderar att använda DMV-produkter kasseras i enlighet med lokala anvisningar vid tidpunkten för kassering.



Denna produkt en medicinteknisk produkt



Skyddas mot direkt solljus



Importör



Förvaras vid högst 105°C



En patient – flera användningar



Tillverkare



Läs bruksanvisningen
dmvcorp.com



Tillverkningsdatum



Tillverkningsland

Auktoriserad representant



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

