



nld



# DMV Scleral Cup™

## Voor sclerale contactlenzen en oogprothesen

### Beoogd gebruik

De DMV Scleral Cup is bedoeld voor het inzetten/verwijderen van sclerale contactlenzen en het verwijderen van oogprothesen.

### Instructies voor gebruik

Maak vóór het eerste gebruik het hulpmiddel schoon met 70% isopropylalcohol en laat het aan de lucht drogen.

**VERWIJDEREN** – Bevochtig de zuignap en knijp in het zuigertje. Breng de zuignap met behulp van een spiegel tegen de sclerale contactlens. Laat de spanning op het zuigertje los om de contactlens vast te zuigen. De contactlens kan vervolgens zodanig worden gemanipuleerd dat de contactlens van het oog kan worden verwijderd. Volg de instructies van uw contactlensspecialist voor de beste techniek. Knijp na verwijdering nogmaals in het zuigertje om de zuignap los te halen en verwijder de lens van de zuignap.

**INZETTEN** – Plaats de vochtige contactlens op de zuignap zonder in het zuigertje te knijpen. De vochtige lens zal aan de zuignap blijven zitten. Knijp NIET in het zuigertje als u de lens inzet. Plaats de sclerale lens voorzichtig in het geopende oog.

Volg de instructies van uw contactlensspecialist/oogspecialist.

### Schoon

Maak de DMV Scleral Cup na elk gebruik schoon met 70% isopropylalcohol en laat aan de lucht drogen. Bewaar het hulpmiddel in zijn doosje nadat het droog is. **Houd het luchtkanaal vrij van vuil.** Vervang het om de zes maanden.

**Voorzorgsmaatregel:** Als de DMV Scleral Cup per ongeluk vast komt te zitten aan het oog, knijpt u licht in het zuigertje om de zuigkracht op te heffen en het hulpmiddel van het oog te halen.

**Waarschuwing:** Houd dit product uit de buurt van vloeistoffen zoals handcrème, haargel, nagellakverwijderaar en krachtige oxiderende middelen.

**Waarschuwing: Verstikkingsgevaar. Houd dit en alle andere medische hulpmiddelen uit de buurt van kleine kinderen.** Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik bij zieke of verwonde ogen. Raadpleeg uw oogspecialist als u last heeft van een geïrriteerd oog, een ongewoon slecht zicht of pijn.

**Waarschuwing:** Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor allergieproblemen met dit product, **bevat het wel droog natuurlijk rubber. Het bevat geen vloeibare latex**, een bekend allergeen.

**Gebruik de DMV Scleral Cup NIET voor ZACHTE of hybride contactlenzen.**

Licht de fabrikant in als u een ernstig incident heeft gehad dat verband houdt met dit hulpmiddel. Als u in de EU woont, dient u het incident te melden bij de bevoegde instantie in de lidstaat waar u woonachtig bent.

Dit product stelt dragers van contactlenzen in staat om hun contactlenzen in te brengen en / of te verwijderen om ze te gebruiken overeenkomstig het beoogde doel. Daarom wordt dit product beschouwd als een medisch hulpmiddel.

### Afvalverwijdering

DMV Corporation adviseert om gebruikte DMV-producten af te voeren overeenkomstig de lokale voorschriften die op het moment van verwijdering van kracht zijn.

Medisch hulpmiddel

Niet warmer bewaren dan 105°C / 220°F

Volg de instructies [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)

Gemachtigde vertegenwoordiger

EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK

Beschermen tegen direct zonlicht

Eén patiënt – meenvoudig gebruik

Datum van fabricage

Importeur

Fabricante

Land van vervaardiging

EC REP  
Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

CH REP  
MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland

UK REP  
Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

UK CA