



spa



DMV Scleral Cup™

Para lentes de contacto esclerales y ojos protésicos

Uso previsto

DMV Scleral Cup está previsto para poner y quitar lentes de contacto esclerales y para retirar prótesis oculares.

Instrucciones de uso

⚠ Antes de usar el dispositivo por primera vez límpielo con alcohol isopropílico al 70 % y deje que se seque al aire.

Retirada – Humedezca la ventosa y apriete el mango. Coloque la ventosa contra la lente de contacto escleral usando un espejo. Suelte la tensión en el mango para que la succión sostenga la lente de contacto. Ahora la lente de contacto se puede manipular para sacarla del ojo. Siga las instrucciones del profesional que le haya ajustado las lentes de contacto. Después de la extracción, apriete de nuevo el mango para soltar la succión y quite la lente de la ventosa.

Aplicación – Coloque la lente de contacto húmeda en la ventosa sin apretar el mango. La lente húmeda se adhiere a la ventosa. NO apriete el mango mientras esté colocando la lente en el ojo. Coloque con cuidado la lente escleral en el ojo abierto.

Siga las instrucciones del profesional que le haya ajustado las lentes de contacto o del oftalmólogo.

Limpieza

Después de usar el DMV Scleral Cup debe limpiarlo con alcohol isopropílico al 70 % y dejar que se seque al aire. Guarde el dispositivo en su estuche cuando se haya secado. **Mantenga el canal de aire limpio.** Deberá sustituirlo cada seis meses.

⚠ **Precisión:** Si el DMV Scleral Cup se queda adherido de manera accidental al ojo, apriete ligeramente el mango para eliminar la succión y saque el dispositivo del ojo.

⚠ **Precisión:** Mantenga este producto alejado de los líquidos, como crema de manos, geles para el cabello, quitaesmalte de uñas y oxidantes fuertes.

⚠ **Precisión: Riesgo de asfixia.** Mantenga este y otros productos sanitarios fuera del alcance de los niños pequeños. El uso de este producto no está recomendado en caso de ojos con alguna patología o lesiones. Si se le irrita el ojo o experimenta algún problema visual inusual o dolor acuda a su oftalmólogo.

⚠ **Precisión:** No hay evidencia de problemas de alergia con este producto, aunque **contiene caucho natural seco**. No contiene látex líquido, un alérgeno conocido.

⚠ **NO use el DMV Scleral Cup para lentes de contacto blandas o híbridas.**

Deberá notificar al fabricante cualquier evento grave que se haya producido en relación con este dispositivo. Si reside en la UE deberá notificar el incidente a la autoridad competente del Estado miembro en el que usted resida.

Este producto permite a los usuarios de lentes de contacto colocar y quitar las lentes de contacto para utilizarlas de acuerdo con el uso previsto. Por tanto, este producto está considerado como un producto sanitario.

Eliminación de residuos

DMV Corporation recomienda desechar los productos DMV usados conforme a las normas legales vigentes en cada país en el momento de la eliminación.

MD Este producto es un producto sanitario.

105°C
220°F
No almacenar a una temperatura superior a 105 °C/220 °F

Lea las instrucciones de uso dmvcorp.com

REP Representante autorizado

Proteger de la luz directa del sol

Un solo paciente - uso múltiple

Fecha de fabricación

Importador

Fabricante

País de fabricación

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

EC REP
Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

CH REP
MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

UK REP
Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

