



SWE



## DMV Scleral Cup™

### För sklerala kontaktlinser och ögonproteser

#### Avsedd användning

DMV Scleral Cup är utformad för att sätta in/ta ut sklerala linser och ta ut ögonproteser.

#### Bruksanvisning

Rengör produkten med 70 % isopropylalkohol och låt lufttorka innan du använder den första gången.

**UTTAGNING** – Fukta sugproppen och tryck ihop handtaget. Placera sugproppen mot den sklerala kontaktlinsen med hjälp av en spegel. Släpp handtaget något så att sugfunktionen håller i kontaktlinsen. Kontaktlinsen kan därefter manipuleras så att kontaktlinsen kan tas ut ur ögat. Följ anvisningarna från din optiker för bästa teknik. När du har tagit ut linsen, tryck på handtaget igen så att suget upphör och ta bort linsen från sugproppen.

**INSÄTTNING** – Placera den fuktiga kontaktlinsen på proppen utan att trycka ihop handtaget. Den fuktade linsen fastnar på proppen. Tryck INTE ihop handtaget när du sätter in linsen. Placera försiktigt den sklerala linsen på det öppna ögat.

Följ anvisningarna från din optiker.

#### Rengöring

Rengör DMV Scleral Cup med 70 % isopropylalkohol efter varje användning och låt lufttorka. Förvara produkten i fodralet efter torkning. **Håll luftkanalen fri från föroreningar.** Byt ut den var sjätte månad.

**Försiktighetsåtgärd:** Om DMV Scleral Cup av misstag fastnar på ögat, tryck ihop handtaget så att suget upphör och ta bort den från ögat.

**Varning:** Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor som handkräm, hårgel, nagellackbortagningsmedel och kraftigt oxiderande ämnen.

**Varning: Kvävningsrisk.** Förvara denna och andra medicintekniska produkter utom synhåll för barn. Denna produkt rekommenderas inte vid ögonsjukdom eller skadade ögon. Om du får ögonirritation, ovanlig synnedläggelse eller smärta, kontakta optiker.

**Varning:** Det finns inga bevis för allergiska problem med produkten. **Den innehåller torr naturgummi. Den innehåller inte flytande latex, en känd allergen.**

**Använd INTE DMV Scleral Cup för MJUKA kontaktlinser eller hybridkontaktlinser.**

Om en allvarlig incident har uppkommit i samband med produkten, rapportera det till tillverkaren. Om du bor i ett EU-land, rapportera händelsen till behörig myndighet i det medlemsland där du bor.

Denna produkt gör det möjligt för kontaktlinsebärare att sätta in och/eller ta ut kontaktlinser för att använda dem enligt avsedd användning. Således anses denna produkt vara en medicinteknisk produkt.

#### Avfallshantering

DMV Corporation rekommenderar att använda DMV-produkter kasseras i enlighet med lokala anvisningar vid tidpunkten för kassering.



Denna produkt en medicinteknisk produkt



Skyddas mot direkt solljus



Importör



Förvaras vid högst 105°C



En patient – flera användningar



Tillverkare



Läs bruksanvisningen  
dmccorp.com



Tillverkningsdatum



Tillverkningsland



Auktoriserad representant



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsewijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

