



lav



## DMV Scleral Cup™

### Sklēras kontaktlēcām un acu protēzēm

#### Paredzētā izmantošana

DMV Scleral Cup ir paredzēts sklēras kontaktlēcū ielikšanai/izņemšanai un acs protēzes izņemšanai.

#### Lietošanas instrukcija

Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet ierīci ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt.

Izņemšana – Samitriniet piesūcekņa kausiņu un saspiediet kātiņu. Skatoties spoguļi, novietojiet piesūcekņa kausiņu pretī sklēras kontaktlēcai. Atlaidiet vaļņgāk kātiņu, lai nodrošinātu lēcas pielipšanu. Pēc tam kontaktlēcū var pārvietot tā, lai izņemtu no acs. Izmantojiet optometrista ieteikto labāko metodi. Pēc izņemšanas vēlreiz saspiediet kātiņu, lai likvidētu piesūkšanos un izņemtu lēcū no piesūcekņa kausiņa.

Ielikšana – Uzlieciet mitro kontaktlēcū uz kausiņa, nesaspiežot kātiņu. Mitrā lēca pielips kausiņam. Ievietojot lēcū, NESASPIEDIET kātiņu. Uzmanīgi ielieciet sklēras lēcū atvērtajā acī.

Ievērojiet optometrista/acs aprūpes speciālista norādījumus.

#### Tīrīšana

Pēc katras DMV Scleral Cup izmantošanas reizes notīriet to ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tam dabiskā veidā nožūt. Pēc nožāvēšanas uzglabājiet ierīci futrālī.

**Nodrošiniet, lai gaisa kanālā nesakrātos netīrumi.** Ieplānojiet tās nomaigu reizi sešos mēnešos.



**Uzmanību!** Ja DMV Scleral Cup nejauši pielip acij, viegli saspiediet kātiņu, lai likvidētu piesūkšanos, un izņemiet to no acs.



**Brīdinājums.** Lūdzu, neuzglabājiet šo izstrādājumu tuvumā tādiem šķidrumiem kā roku krēms, matu geli, nagu lakas noņēmējs un spēcīgi oksidētāji.



**Brīdinājums. Atzīšanās risks.** Uzglabājiet šo un visas citas medicīniskās ierīces maziem bērniem nepieejamā vietā. Šo izstrādājumu nav ieteicams lietot bojātās vai traumētās acīs. Ja Jums rodas acs kairinājums, neparasti redzes traucējumi vai sāpes, konsultējieties ar acs aprūpes speciālistu.



**Brīdinājums.** Lietojot šo izstrādājumu nav ziņots par alerģijām, **tas nesatur sausu dabisko kaučuku. Tas nesatur šķidro lateksu**, kas ir zināms alergēns.



**NELIETOJĒT DMV Scleral Cup MĪKSTAJĀM vai hibrīda kontaktlēcām.**

Ja Jums rodas jebkāds nopietns negadījums, kas saistīts ar šīs ierīces lietošanu, ziņojiet par to ražotājam. Ja Jūs dzīvojat ES, par negadījumu ziņojiet tās Dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā Jūs pastāvīgi uzturaties.

Izmantojot šo izstrādājumu, kontaktlēcū nēsātāji var ievietot un/vai izņemt kontaktlēcas, lai varētu tās lietot atbilstoši paredzētajam mērķim. Tāpēc šis izstrādājums ir uzskatāms par medicīnisku ierīci.

#### Atkritumu likvidēšana

DMV Corporation iesaka likvidēt izlietotos DMV izstrādājumus atbilstoši likvidēšanas brīdī spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem.



Šis izstrādājums ir medicīniska ierīce



Sargāt no tiešas saules gaismas



Importētājs



Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz 105°C/220°F



Vienam pacientam – atkārtotai lietošanai



Ražotājs



Skatīt lietošanas instrukciju [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Ražošanas datums



Ražošanas valsts



Pilnvarotais pārstāvis



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

