




por

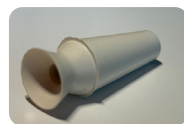

# DMV Vented Scleral Cup™

## Para lentes de contacto híbridas e esclerais

### Utilização prevista

O DMV Vented Scleral Cup foi concebido para introduzir lentes de contacto híbridas e esclerais.

### Instruções de utilização

Antes de utilizar pela primeira vez, limpe o dispositivo com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar.

Introdução – Há um canal de ar que atravessa o dispositivo para desativar a sucção. Isso permite que a lente de contacto seja colocada no olho sem aderir ao dispositivo.

Segure o dispositivo numa posição vertical e coloque a lente de contacto na ventosa. Ao introduzir lentes híbridas ou esclerais, assegure-se de que preenche a lente com a solução aprovada. Utilizando um espelho, eleve cuidadosamente o dispositivo até ao olho aberto e toque com a lente no olho.

Siga as instruções do seu especialista em lentes de contacto/ocular.

### Limpeza

De cada vez que utiliza o DMV Vented Scleral Cup, limpe-o com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar. Depois de estar seco, armazene o dispositivo na respetiva caixa. **Mantenha o canal de ar livre de detritos.** Planeie a respetiva substituição a cada seis meses.

**Precaução:** Se aplicar o dispositivo acidentalmente na superfície do olho, basta retirá-lo do olho, porque não há sucção. Evite fazer deslizar o dispositivo sobre a superfície do olho.

**Cuidado:** Mantenha este produto afastado de líquidos como creme para as mãos, gel para o cabelo, removedor de verniz de unhas e agentes oxidantes fortes..

**Cuidado:** Perigo de asfixia. Mantenha este e todos os outros dispositivos médicos fora do alcance das crianças pequenas. Não se recomenda a utilização deste produto em caso de doença ou lesão ocular. Em caso de irritação ocular, perturbação involgar **da vista ou dor, consulte o seu especialista ocular.**

**Cuidado:** Embora não haja evidências de alergias com este produto, o produto contém borracha natural seca. Não contém látex líquido, que é um alérgico conhecido.

**NÃO UTILIZE este dispositivo PARA REMOVER lentes de contacto**

Se lhe tiver ocorrido qualquer incidente grave em relação a este dispositivo, notifique o fabricante. Caso resida na UE, notifique a autoridade competente do Estado-Membro onde vive sobre o incidente.

Este produto permite que as pessoas que usam lentes de contacto as introduzam e/ou removam para as utilizarem de acordo com a finalidade prevista. Portanto, considera-se que este produto é um dispositivo médico.

### Eliminação de resíduos

A DMV Corporation recomenda que os produtos DMV utilizados sejam eliminados em conformidade com os regulamentos locais em vigor no momento da eliminação.

Este produto é um dispositivo médico.

Não armazenar a uma temperatura superior a 105 °C / 220°F

Ler as instruções de utilização. [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)

Representante autorizado

EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK

Proteger da luz solar direta.

Doente único — utilização múltipla

Data de fabrico

Importador

Fabricante

País de fabricação

Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland

Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

